


おて画る MAX の初期設定についての説明になります。

おて画る MAX 登録後、アプリを使用するための初期設定が必要になります。

おて画る MAX が起動しましたら「設定」をクリックします。

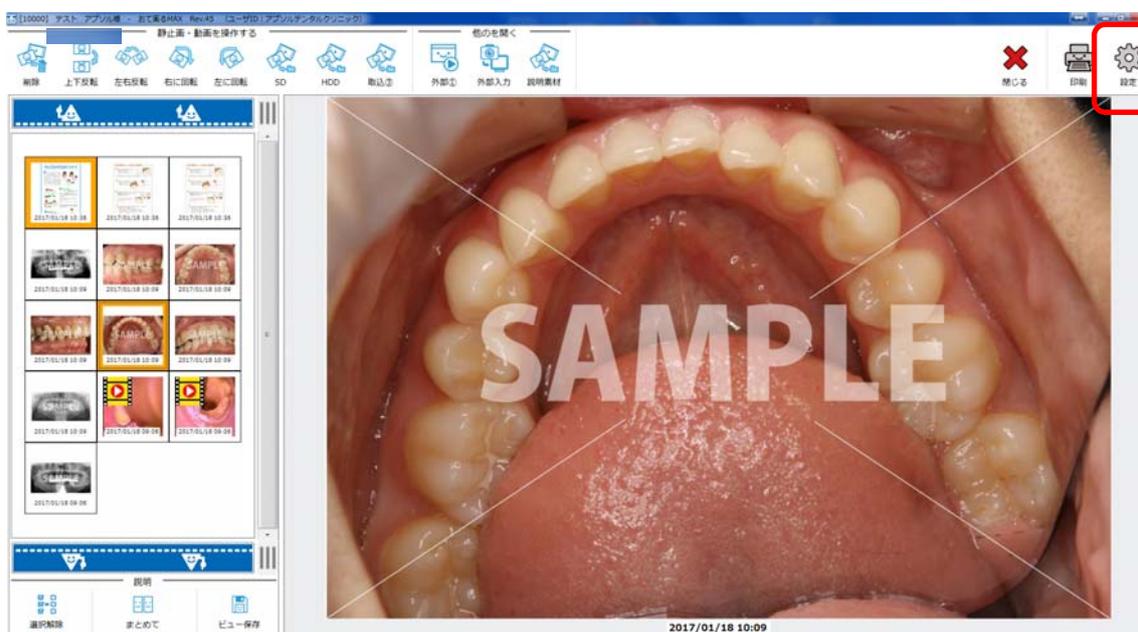

※おて画る MAX の登録方法はホームページのテクニカル内にあります

「おて画る MAX をレセコンで起動するための設定」をご参照ください。

設定 1

設定

OK キャンセル

設定 1 設定 2 設定 3 設定 4

① フォルダ、ファイルパス

基本フォルダ: C:\おて画る 参照

自動取込フォルダ: C:\Users\YONEUSER\Documents 参照

ffmpeg実行ファイル: E:\64bit\ffmpeg.exe 参照

ffprobe実行ファイル: E:\64bit\ffprobe.exe 参照

初期ビューノファイル: 参照

印刷ロゴファイル: 参照

② 静止画自動リサイズ

幅: 1200

高さ: 1200

③ お絵かき画面左右クリック(タップ)挙動: 左クリック(タップ) = 線を描画する 右クリック(タップ) = 画像を移動する

設定の画面が表示されます。


☆フォルダ・ファイルパスの設定

① 基本フォルダ・自動取込フォルダの設定。

基本フォルダ :	¥¥192.168.100.200¥share	参照
自動取込フォルダ :	¥¥192.168.100.200¥share¥Eye-fi	参照

基本フォルダは患者さんの画像が保存されているフォルダを指定します。

※↑の画像では LAN ケーブルで繋がった外付け HDD を使用している場合です。

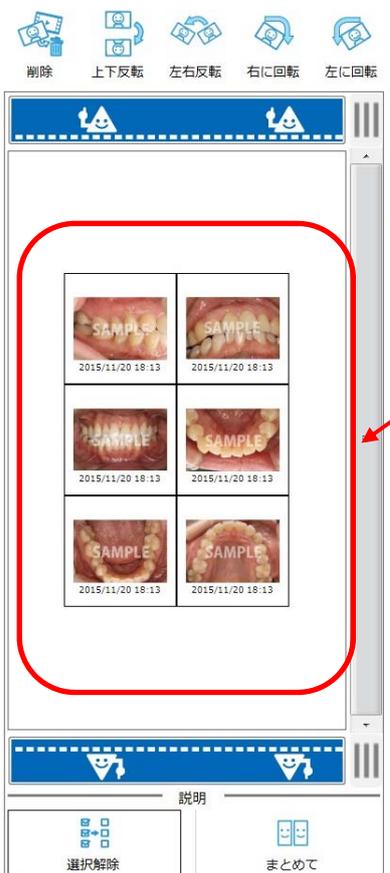

基本フォルダは患者さんの画像が保存されているメインのフォルダになります。

自動取込フォルダは Eye-fi などの無線機能付き SD カードなどを使用したときの保存場所と同じ場所を指定したり、マイクロスコープの画像が保存される場所等を指定します。おて画る MAX では「自動取込」ボタンを押した状態で自動取込フォルダに画像が入ってくるとその患者さんの基本フォルダに自動的に画像が転送されるというものになります。

☆ ffmpeg,ffprobe の動画の実行ファイルの設定。

iPad で動画を再生できる方式に変換するものになります。

ffmpeg実行ファイル :	<input type="text" value="E:¥64bit¥ffmpeg.exe"/>	<input type="button" value="参照"/>
ffprobe実行ファイル :	<input type="text" value="E:¥64bit¥ffprobe.exe"/>	<input type="button" value="参照"/>

これは必要であれば行う設定です。

詳しくはホームページのテクニカル資料にある「お手軽 Viewer で動画も再生したい場合」

[http://www.ote-ga-ru.jp/wp-](http://www.ote-ga-ru.jp/wp-content/uploads/2015/08/%E3%81%8A%E3%81%A6%E7%94%BB%E3%82%8BViewer%E3%81%A7%E5%8B%95%E7%94%BB%E3%82%82%E5%86%8D%E7%94%9F%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84%E5%A0%B4%E5%90%88.pdf)

[content/uploads/2015/08/%E3%81%8A%E3%81%A6%E7%94%BB%E3%82%8BViewer%E3%81%A7%E5%8B%95%E7%94%BB%E3%82%82%E5%86%8D%E7%94%9F%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84%E5%A0%B4%E5%90%88.pdf](http://www.ote-ga-ru.jp/wp-content/uploads/2015/08/%E3%81%8A%E3%81%A6%E7%94%BB%E3%82%8BViewer%E3%81%A7%E5%8B%95%E7%94%BB%E3%82%82%E5%86%8D%E7%94%9F%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84%E5%A0%B4%E5%90%88.pdf)

を参照してください。

☆ 初期ビューファイル設定。

おて画の MAX を立ち上げた時の画面に表示させる画像や動画を設定します。

※参照をクリックし、ファイルを選択します。

初期ビューファイル :	<input type="text"/>	<input type="button" value="参照"/>
-------------	----------------------	-----------------------------------

患者さんへ見てほしい動画や CM のようなものをリピートで再生する機能になります。

※ファイルの有無で動作の動きに影響は出ません。

☆ 印刷ロゴファイルの設定。

印刷ロゴファイル:

参照

印刷した時に指定したロゴを右上に入れることができます。

※ロゴは高さ40ピクセル程度のものご用意いただくときれいに印刷できます。

横のピクセル数は指定がありません。

[1] テスト 太郎様



↑ 左上にカルテ番号と患者様氏名、右上に指定されたロゴが入ります。↑

② 静止画自動リサイズの設定。

静止画自動リサイズ幅:

静止画自動リサイズ高さ:

口腔内カメラ等で撮影した画像を自動でリサイズする数値の指定をします。
この数値で印刷時の画像の細かさが変化します。

※画像そのままのデータ量は必要ないのでこのリサイズ機能があります。

あまり小さい数値だと荒くなってしまいますので1500くらいで様子を見てから変更して下さい。

③ お絵かき画面での設定

お絵かき画面左右クリック(タップ)挙動:

左クリック(タップ)=線を描画する	右クリック(タップ)=画像を移動する
左クリック(タップ)=線を描画する	右クリック(タップ)=画像を移動する
左クリック(タップ)=画像を移動する	右クリック(タップ)=線を描画する

お絵かき画面でマウスの左右クリックの動きを反対にする設定です。

医院さんで使いやすい項目を選んでください。

設定 2

設定

OK キャンセル

設定 1 設定 2 設定 3 設定 4

取り込みボタン：

	表示	コメント	指定フォルダ	
①	<input checked="" type="checkbox"/>	SD	¥¥Onesrv¥おて画る	参照
②	<input checked="" type="checkbox"/>	HDD		参照
③	<input type="checkbox"/>	取込③		参照

外部ボタン：

	表示	コメント	プログラム	パラメータ
①	<input checked="" type="checkbox"/>	外部①	C:¥おて画る¥画像	
②	<input type="checkbox"/>	外部②		

取り込み上限ファイル数： 999

④ 取り込みボタンの設定。

静止画・動画を操作する

削除 上下反転 左右反転 右に回転 左に回転 取込① 取込② 取込③ 自動取込

他のを開く

外部① 外部②

静止画・動画を操作する

削除 上下反転 左右反転 右に回転 左に回転 SD HDD 取込③ 自動取込

他のを開く

外部① 外部②

このように取り込みボタンの名称を変更する設定となっています。

名称の変更は↓の欄に入力することで切り替わります。

	表示	コメント	指定フォルダ	
①	<input checked="" type="checkbox"/>	SD	F:¥	参照
②	<input checked="" type="checkbox"/>	HDD	E:¥	参照
③	<input checked="" type="checkbox"/>	取込③		参照

よく使う取り込み方法があれば名前を変えてわかりやすく表示してみましょう。

※名称の文字数は4文字までです、5文字以上は入力できませんのでご注意ください。

※必要なければ左の表示のチェックを外すと非表示になります。

例えば以下の設定で使いたいとき・・・

- ① カメラで撮った写真をSDカードでパソコンに取り込む場合
- ② 共有フォルダから取り込む場合
- ③ レントゲンソフトのエクスポート先のフォルダを選択する
という場合は

	表示	コメント
①	<input checked="" type="checkbox"/>	SD
②	<input checked="" type="checkbox"/>	共有
③	<input checked="" type="checkbox"/>	X線

と登録します。

⑤ 外部ボタンの設定。

外部ボタンはそのアイコンをクリックすると指定した他のアプリケーションを起動することが出来ます。


「外部①」ボタンにペイントを設定しました。

	表示	コメント	プログラム	パラメータ
①	<input checked="" type="checkbox"/>	ペイント	mspaint	
②	<input type="checkbox"/>	外部②		

「外部①」ボタンがペイントに変化しました。このアイコンをクリックすると、



ペイントが立ち上がってきます。

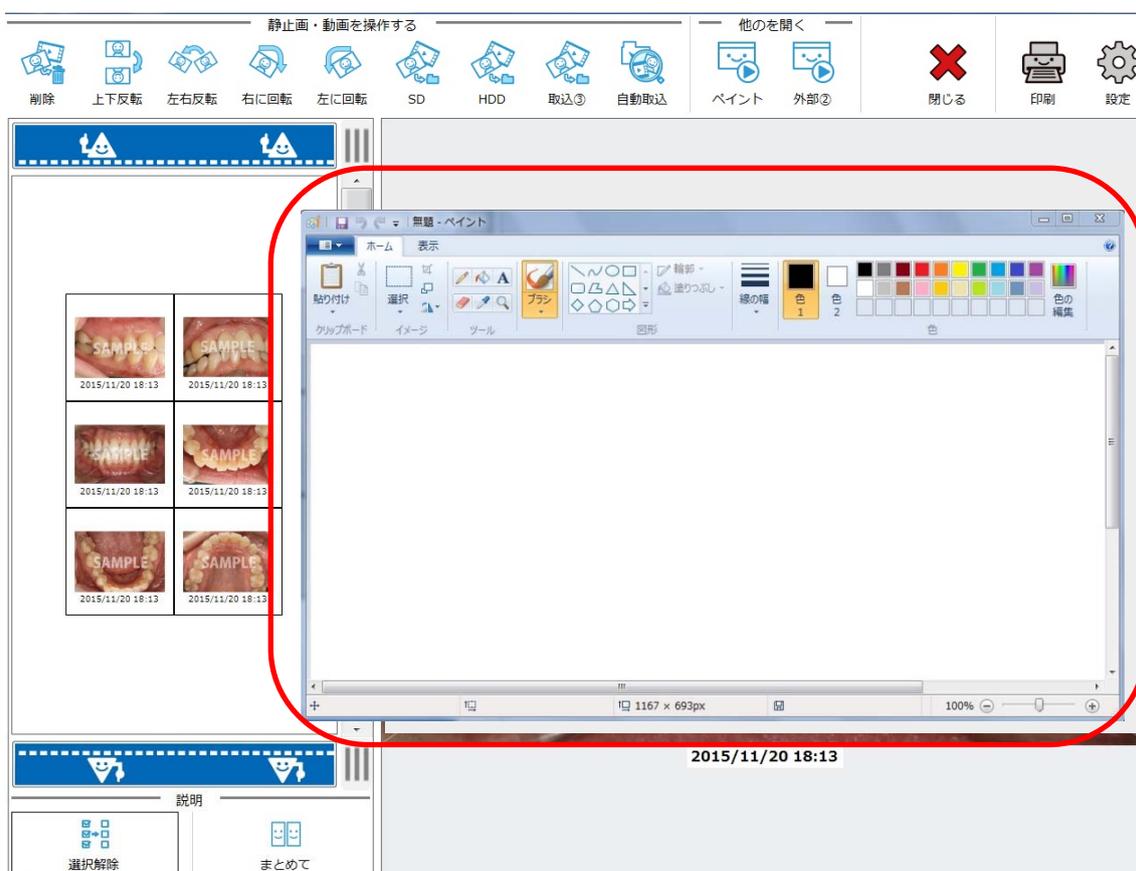

⑥ 取り込み上限ファイル数

取り込み先に画像、動画がたくさんあると開くのに時間がかかってしまいます。

多くの場合最近のデータを患者さんに見せることがメインとなるでしょう。

その都度すべてのデータを読み込む必要が無い場合この設定をしておくことでその数字までのデータを読み込みますので表示が速くなります。

※未設定の場合はすべて読み込みます。

設定 3

設定

OK キャンセル

設定 1 設定 2 設定 3 設定 4

⑦ 動画録画

録画前待機秒数: 1
録画秒数: 1

⑧ 静止画間隔撮影

撮影前待機秒数: 1
撮影回数: 1
撮影間隔秒数: 1

⑨ 説明用素材取り込みボタン:

表示	コメント	指定フォルダ	
<input checked="" type="checkbox"/>	説明素材	C:\¥おて画る¥症例	参照

⑩ 動画再生画面で動画再生中、メーターを移動させた後に一時停止をしない

自動取込: 無効

自動取込中ダイアログの表示: 表示しない

キーバインド

録画ボタン:

撮影ボタン:

間隔撮影ボタン:

お絵描き拡大:

お絵描き縮小:

⑦ 動画録画設定

外部入力画面の録画時の設定です。

動画録画

録画前待機秒数: 5

録画秒数: 10

録画前待機時間は録画ボタンを押してから録画が開始されるまでの秒数
録画秒数は動画の長さになっています。

⑧ 静止画間隔撮影

静止画間隔撮影

撮影前待機秒数 :	5
撮影回数 :	5
撮影間隔秒数 :	3

撮影前待機秒数は「間隔撮影」ボタンを押してから最初の撮影をするまでの時間です

撮影回数は間隔をあけて何枚写真を撮るかの枚数です。

撮影間隔秒数は撮影と撮影の間を何秒空けるかの秒数です。

⑨ 説明用素材取り込みボタン

指定フォルダに説明用の資料が入っている場所を指定しましょう。

コメントに初期設定では「説明素材」と入力されていますので分かりやすい文言に変更しましょう。

※コメントの文字数は4文字までです、5文字以上は入力できませんのでご注意ください。

※説明資料が必要ない場合は左側の表示のチェックを外してください。

説明用素材取り込みボタン：

表示	コメント	指定フォルダ
<input checked="" type="checkbox"/>	説明資料	G:¥説明資料 参照

資料があるフォルダを指定しましょう。

⑩ 自動取込の設定

上のチェックは動画再生中に再生バーを手動で動かした後に一時停止になるをクリックした指を離した瞬間に再生されるかの設定です。

- 動画再生画面で動画再生中、メーターを移動させた後に一時停止をしない

自動取込： 無効

自動取込中ダイアログの表示： 表示する

また自動取込を使用する、しないの設定や使用するを選択した際に半透明のダイアログの表示をするかしないかの設定もここから行います。

⑪ キーバインド


キーバインド

録画ボタン：	a
撮影ボタン：	b
間隔撮影ボタン：	c
お絵描き拡大：	d
お絵描き縮小：	e

各ボタンをキーボード等のボタンと同じ動きに変更出来ます。

※この設定とフットペダルの設定を合わせればペダルを踏んでの録画、撮影やペンタブレットのペンのボタンで画像の拡大、縮小が出来るようになります。

設定が終わりましたら OK を押しておて画る画面に戻ります。

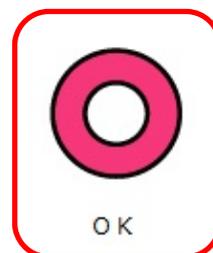

キャンセル

設定 4

設定

OK キャンセル

設定 1 設定 2 設定 3 設定 4

⑫ お見積りボタン：

表示	コメント	お見積り画面アイテム指定フォルダ	
<input checked="" type="checkbox"/>	お見積り	C:¥おて画る¥おて画る 見積書	参照

⑬ お見積り画面コメント欄文言：

やむをえない事情により予定が変更になった場合には、治療費が変更となる場合がございます。本見積有効期限は発行日より1ヶ月です。

⑭ お見積り画面消費税率(%)： 8

⑫ お見積りボタン

お見積り画像データを作成し、指定しておく事でスムーズに自費項目を指定することが出来ます。

⑬ お見積り画面コメント欄文言

3

		😊	0	0	0	×
--	--	---	---	---	---	---

4

		😊	0	0	0	×
--	--	---	---	---	---	---

5

		😊	0	0	0	×
--	--	---	---	---	---	---

小計 0
消費税 0

😊

やむをえない事情により予定が変更になった場合には、治療費が変更となる場合がございます。本見積有効期限は発行日より1ヶ月です。

文字を入れることで見積書の右下に注意事項等を載せることが出来るようになります。

⑭ お見積り画面消費税率 (%)

お好みで消費税率を変更出来ます。

※初期値は8%となっています。